


### endo★star K - FILES

#### 1. Загальний опис:

К файли - це сталеві, безпечні інструменти з 4-ма ріжучими гранями. Дуже добре справляються з виявленням і обробкою тонких каналів. Це одні з найстаріших ендодонтичних інструментів, запроектованих згідно з формою, винайденої доктором Кетт.

- 4 ріжучі грані,
- зроблені з нержавіючої сталі,
- поперечний розріз: 
- відмінна еластичність,
- безпечні, не надто агресивне,
- ергономічна ручка з надрукованим розміром по ISO.

#### 2. Рекомендована кількість використань:

Максимум 1-3 рази в залежності від розміру (див. Таблиця 1), за умови, що візуальний контроль, що здійснюється стоматологом перед наступним використанням вказує, що інструмент не був пошкоджений попереднім використанням, що не зігнутий (не стосується випадків спеціального загинання інструменту під кривизну каналу), що не деформований, не проявляє ознак "втоми" стрижня інструменту, а також надійно кріпиться до ручки. Використання інструменту більшу кількість разів, ніж рекомендований, може привести до його поломки в каналі.

Таблиця 1

Розмір	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Кількість використань	1	1	1	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Розмір	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	
Кількість використань	4-5	4-5	4-5	4-5	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	

#### 3. Очищення і дезінфекція:

Докладна інструкція по очищенню і дезінфекції можна знайти на веб-сайті [www.poldent.pl](http://www.poldent.pl) і [www.endostar.eu](http://www.endostar.eu).

### 4. Стерилізація:







Вироби нестерильні. Перед використанням слід їх стерилізувати. Інструменти можна багаторазово стерилізувати в паровому автоклаві при температурі 134 градуса. Рекомендований час стерилізації 35-40 хвилин. Інструменти можна дезінфікувати в м'яких дезінфікуючих засобах, а також можна їх чистити в ультразвукових мийках. Дуже агресивні дезінфікуючі засоби можуть привести до порушення структури матеріалу, з якого зроблена ручка, або ж до її знебарвлення.

### 5. Зберігання:

Інструменти слід зберігати при кімнатній температурі в сухому, чистому середовищі, без пилу.

### 6. Попередження:

Тільки для використання в стоматології.

	Поперечний розріз
	Знак CE
	Стерилізація в паровому автоклаві темп. 134°C
	Нестерильний продукт
	Для обробки каналу зуба
	Партія товару
	Перед використанням прочитайте інструкцію
	Нержавіюча сталь



#### Виробник:

Poldent Sp. z o. o.

вул. Дзіка 2

00-194 Варшава, Польща

тел.: +48 22 351-76-50 до 51

факс: +48 22 351-76-79

[www.poldent.pl](http://www.poldent.pl), e-mail: [poldent@poldent.pl](mailto:poldent@poldent.pl), [endostar@endostar.eu](mailto:endostar@endostar.eu)



Дата останнього оновлення інструкції: 27.09.2017

Назва виробу:	Інструменти стоматологічні (назва виробу вказана на упаковці)
Уповноважений представник в Україні та адреса:	<b>Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»</b>  вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a> <a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a>
