

CANAL CLEAN



Рідина для промивки і сушки кореневих каналів
ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЮ
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

Склад: ізопропіловий спирт, ацетон, етилацетат.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Препарат CANAL CLEAN призначений для використання під час стоматологічного лікування для того, щоб прополоскати кореневий канал. Це прискорює висушування каналу перед пломбуванням.

Використання адаптера з гвинтом для набирання препарату у шприц

1. Зняти кришку пляшки.
2. Закріпити адаптер на пляшці.
3. Необхідно усунути блакитний ковпачок, вкрутити кінець шприца у отвір адаптера, перевернути вверх дном і набрати рідину. потім поставити пляшку на дно і акуратно вкрутити наповнений шприц з адаптера. Рекомендується використовувати шприц типу luer-lock з гумовим поршнем.
4. Після кожного використання, закрити адаптер блакитним ковпачком.
5. Для транспортування необхідно зняти адаптер і закрити пляшку кришкою.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Після ретельної обробки каналу, як останній засіб використовується CANAL CLEAN за допомогою шприца з ендодонтичного голкою, а потім осушити канал паперовими штифтами.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не слід використовувати у хворих з підвищеною чутливістю до інгредієнтів препарату.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Може викликати подразнення шкіри. Викликає подразнення слизових оболонок ротової порожнини. У разі контакту негайно промити водою. Продукт подразнює очі. У разі контакту, негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. При попаданні всередину не викликайте блювоту. Пийте багато води. Зверніться до лікаря. Може викликати сонливість і запаморочення.

При роботі з продуктом використовуйте коффердам. Одягайте рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОЗАТОР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РІДИНИ!

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності знаходиться на основній упаковці.

Після відкриття термін дії не змінює за умов ущільненого закривання після кожного використання.

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ


Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробникам.

УПАКОВКА

Флакон, що містить 45 мл препарату, перехідник з кришкою, що закручується, дозатор.



CERKAMED Войцех Павловскі
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковского, 1
тел./факс 0048 15 842-35-85

Уповноважений представник в Україні та адреса:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
 UA.TR.101	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua

Дата останнього оновлення: 10.10.2016/2