

## endo★star FINGER SPREADERS

### 1. Загальний опис:

Endostar Finger Spreaders - це інструменти для бічної (латеральної) конденсації гутаперчі. Зроблені з нержавіючої стоматологічної сталі і імпоротної сировини, що гарантує високу якість виробу.

- мають форму гострого конуса,
- ергономічна ручка з надрукованим розміром по ISO.

### 2. Рекомендована кількість використання:

Максимум 1-3 рази в залежності від розміру (див. Таблиця 1), за умови, що візуальний контроль, що здійснюється стоматологом перед наступним використанням вказує, що інструмент не був пошкоджений попереднім використанням, що не зігнутий (не стосується випадків спеціального загибання інструменту під кривизну каналу), що не деформований, не проявляє ознак "втоми" стрижня інструменту, а також надійно кріпиться до ручки. Використання інструменту більшу кількість разів, ніж рекомендований, може привести до його поломки в каналі.

Таблиця 1

Розмір	15	20	25	30	35	40
Кількість використання	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3

### 3. Очищення і дезінфекція:

Докладна інструкція по очищенню і дезінфекції можна знайти на веб-сайті [www.poldent.pl](http://www.poldent.pl) і [www.endostar.eu](http://www.endostar.eu).

### 4. Стерилізація:








Вироби нестерильні. Перед використанням слід їх стерилізувати. Інструменти можна багаторазово стерилізувати в паровому автоклаві при температурі 134 градуса. Рекомендований час стерилізації 35-40 хвилин. Інструменти можна дезінфікувати в м'яких дезінфікуючих засобах, а також можна їх чистити в ультразвукових мийках. Дуже агресивні дезінфікуючі засоби можуть привести до порушення структури матеріалу, з якого зроблена ручка, або ж до її знебарвлення.

## 5. Зберігання:

Інструменти слід зберігати при кімнатній температурі в сухому, чистому середовищі, без пилу.

## 6. Попередження:

Тільки для використання в стоматології.

	Знак CE
	Стерилізація в паровому автоклаві темп. 134°C
	Нестерильний продукт
	Для обробки каналу зуба
	Партія товару
	Перед використанням прочитайте інструкцію
	Нержавіюча сталь

**Виробник:**

Poldent Sp. z o. o.  
вул. Дзіка 2  
00-194 Варшава, Польща  
тел.: +48 22 351-76-50 до 51  
факс: +48 22 351-76-79



[www.poldent.pl](http://www.poldent.pl), e-mail: [poldent@poldent.pl](mailto:poldent@poldent.pl), [endostar@endostar.eu](mailto:endostar@endostar.eu)

Дата останнього оновлення інструкції: 27.09.2017

Назва виробу:	Інструменти стоматологічні (назва виробу вказана на упаковці)
Уповноважений ий представник в Україні та адреса:	<b>Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»</b>  вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a> <a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a>
	