

Індикатор карієсу

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ

ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СКЛАД: 4-етилловий родамін, пропіленгліколь, поверхнево-активні речовини.ПРИЗНАЧЕННЯ

Препарат RED DETECTOR призначений для локалізації тканин уражених карієсом.

Червоний барвник, що міститься в препараті, проникає у тканину що уражена карієсом і забарвлює її червоним кольором. Підвищує безпеку роботи, дозволяючи знаходити дентин, уражений карієсом і зберегти здорові тканини.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Перед початком процедури аплікатор, що додається необхідно занурити у спирт (етанол), а потім приєднати до шприца.

Після видалення всіх видимих уражених тканин карієсом нанести краплю препарату, почекайти 5-10 секунд, потім промити і висушити порожнину. Сильно зафарбовані у червоний колір тканини вказують на ураження карієсу.

Після використання препарату слід відтягнути поршень шприца, щоб запобігти витоків надлишків препарату, від'єднати аплікатор, а потім закрити шприц білою кришкою.

Препарат призначений для багаторазового використання, в той час як аплікатор призначений для єдиного використання. Багаторазове використання аплікатора може представляти небезпеку вторинної інфекції.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не слід використовувати препарат у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При роботі з препаратом застосовувати кофердам. Використовувати рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності зазначено на упаковці.

Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ

Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробникові.

УПАКОВКА

Шприц, що містить 2 мл препарату, одноразові аплікатори з пензликом.




PPH CERKAMED

Войцех Павловські

37-450 Стальова Воля, Польща

вул. Квятковського, 1

тел./факс 0048 15 842-35-85

Уповноважений представник в Україні та адреса:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
 UA.TR.101	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua

Дата останнього оновлення: 16.09.2016/3