

**Біоматеріал для заповнення та реконструкції кореневих каналів
ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЮ
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ**

СКЛАД:

Bio MTA+powder: оксид кальцію, гідроксиапатит кальцію, та оксиди: кремнію, заліза, алюмінію, натрію, калію, вісмуту, магнію, цирконію, фосфат кальцію.

Bio MTA+ liquid: вода фармацевтичного класу, каталізатор кальцію.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Продукт призначений для використання під час стоматологічного лікування в якості матеріалу для заповнення і ремінералізації кореневих каналів. При змішуванні з рідиною Bio MTA+ liquid робочий час складає близько 4 хв., а повне затвердіння матеріалу відбувається приблизно через 2 години.

Діє ремінералізуючи на тканини зуба, в зв'язку з високим вмістом іонів кальцію. Кремнієво-кальцієві з'єднання допомагають відновити тканини після перфорації стінок і внутрішньоканальній резорбції. Крім того, продукт Bio MTA + містить в своєму складі гідроксиапатит, який є природним компонентом кістки, завдяки чому відмінно вбудовується в її структуру.

Bio MTA+ особливо рекомендується у наступних випадках:

- перфорація стінок кореневих каналів,
- внутрішньоканальна резорбція,
- зворотнього заповнення верхівки кореня зуба,
- під час безпосередньому покритті пульпи,
- під час операції ампутації пульпи,
- у лікуванні зубів з неповним розвитком кореня.

Bio MTA+ не слід використовувати для повної obturaції кореневого каналу.

Після перемішування Bio MTA + має виняткову пластичність, тверду консистенцію, не текучий, тримається на інструменті. Завдяки цьому, внесення матеріалу Bio MTA+ є значно зручнішим в порівнянні з традиційними типами матеріалів MTA.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Відрізати верхівку піпетки під назвою Bio MTA+ liquid.

Вміст усього скляного флакону під назвою Bio MTA+ powder та 1-2 краплі рідини Bio MTA+ liquid розмістити на склі для замішування. Перемішувати близько 30 секунд до отримання консистенції м'якого пластиліну. Якщо матеріал занадто щільний або розсипчастий, додайте ще одну краплю рідини Bio MTA+ liquid.

УВАГА! Bio MTA+powder слід змішувати тільки з рідиною Bio MTA+ liquid. Не заміняти водою або іншими рідинами.

Внесіть препарат у підготовлене місце за допомогою інструмента.

Упаковка Bio MTA+powder містить дозу для одноразового використання. При змішуванні з рідиною Bio MTA+ liquid слід споживати приготовану дозу протягом максимум 4 хвилин. Після цього часу, відбувається затвердіння маси.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

Не використовувати препарат при запальних процесах, тому що кислий pH порушує зв'язування Bio MTA+. Під час змішування Bio MTA+ powder забороняється застосовувати воду або інші рідини, слід застосовувати виключно рідину Bio MTA+ liquid.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Виріб може викликати пошкодження очей.

Діє дратівливо на слизову оболонку порожнини рота, шкіру і очі. У разі контакту негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

У разі вживання не викликати блювоту. Випити велику кількість води. Зв'язатися з лікарем. Під час роботи з продуктом слід застосовувати коффердам, одноразові рукавички і захисні окуляри.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25 °С. Оберігати від вологи.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності є на упаковці.

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ

Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробнику.

УПАКОВКА

Флакон скляний, містить 0,14 г порошку Bio MTA+ powder, піпетка, що містить 1 мл рідини Bio MTA+ liquid.



CERKAMED Войцех Павловські
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковского, 1
тел./факс 0048 15 842-35-85

Уповноважений представник в Україні та адреса:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
 UA.TR.101	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м.Івано- Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38(0342)559455 e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua

Дата останнього оновлення:18.07.2016/1