

endo★star PEESO REAMERS

П'ЄЗО РИМЕРИ ЕНДОСТАР

1. Загальний опис:

П'єзо Римери Ендостар- це ротаційні інструменти для розширення гирла каналу, а також для обробки прямої, прикоронкової частини каналу. Інструменти Peeso відрізняються від розширювачів Gates робочою частиною, що має довшу, циліндричну форму з ширше реставленими ріжучими гранями.

- низька пружність вістря,
- рекомендована кількість оборотів в хвилину: 800-1200,
- кінчик притуплен (не ріжучий).

2. Рекомендована кількість використань:

Максимум 5-10 разів в залежності від розміру (див. Таблиця 1), за умови, що візуальний контроль, що здійснюється стоматологом перед наступним використанням вказує, що інструмент не був пошкоджений попереднім використанням, що не зігнутий що не деформований, не проявляє ознак "втоми" стрижня інструменту, а також надійно кріпиться до ручки. Використання інструменту більшу кількість разів, ніж рекомендований, може привести до його поломки в каналі.

Таблиця 1

Розмір	01	02	03	04	05	06
Кількість використань	5	5	5	10	10	10

3. Очищення і дезінфекція:

Докладна інструкція по очищенню і дезінфекції можна знайти на веб-сайті www.poldent.pl і www.endostar.eu.

4. Стерилізація:








Вироби нестерильні. Перед використанням слід їх стерилізувати. Інструменти можна багаторазово стерилізувати в паровому автоклаві при температурі 134 градуса. Рекомендований час стерилізації 35-40 хвилин. Інструменти можна дезінфікувати в м'яких дезінфікуючих засобах, а також можна їх чистити в ультразвукових мийках. Дуже агресивні дезінфікуючі засоби можуть привести до порушення структури матеріалу, з якого зроблена ручка, або ж до її знебарвлення.

5. Зберігання:

Інструменти слід зберігати при кімнатній температурі в сухому, чистому середовищі, без пилу.

6. Попередження:

Тільки для використання в стоматології.

	Знак CE і ідентифікаційний номер сертифікаційного органу
	Стерилізація в паровому автоклаві темп. 134°C
	Нестерильний продукт
	Для обробки каналу зуба
	Партія товару
	Перед використанням прочитайте інструкцію
	Нержавіюча сталь

CE
2274

Дата останнього оновлення інструкції: 13.06.2019

 ПОЛДЕНТ Сп. з о.о. вул. Дзіка 2, 00-194, Варшава, Польща тел.: (22) 351 – 76 50 – 53 E-mail: poldent@poldent.pl WEB: poldent.pl	Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ІВОДЕНТ» вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, УКРАЇНА; тел./ факс: +38 (034) 255 94 55 E-mail: info@ivodent.com.ua WEB: www.ivodent.com.ua	 UA.TR.116 Знак відповідності технічним регламентам та ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності
--	--	--