

# HYDROCAL

гідроксид кальцію

CE 1011

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЮ

ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

**СКЛАД** гідроксид кальцію, гідроксиапатит кальцію, карбонат кальцію, карбонат натрію безводний, оксид магнію.

## **ПРИЗНАЧЕННЯ**

Hydrocal призначений для використання під час лікування зубів, як матеріал для тимчасового ломбування порожнин та корневих каналів методом наповнення, а також методом прямого і непрямого покриття пульпи.

Препарат має ремінералізуючу дію на тверді тканини зуба та є тимчасовим наповненням порожнини або канала перед кінцевим пломбуванням. Hydrocal замішувати у пасту в поєднанні з обраною рідиною, головним чином з фізіологічним розчином.

## **СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ**

Змішайте гідроксид кальцію з дистильованою водою або фізіологічним розчином до пастоподібної консистенції, заповнюйте порожнину або канал. Заповнення залишити у порожнині або у корневому каналі на час від 1 тижня до 30 днів.

## **ПРОТИПОКАЗАННЯ**

Не слід використовувати у пацієнтах з підвищеною чутливістю до інгредієнтів препарату.

## **ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**

Продукт може становити ризик серйозного пошкодження очей. У разі контакту, негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Продукт викликає подразнення шкіри і слизових оболонок порожнини рота. У разі контакту, негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

При попаданні всередину, пити багато води, не викликайте блювоту. Зверніться до лікаря.

При роботі з продуктом слід використовувати одноразові рукавички і захисні окуляри.

## **ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°C. Беретти від вологи. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності знаходиться на первинній упаковці.

Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.

## **ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКОЮ ВИРОБА**


Порожні контейнери повинні бути утилізовані або повернуті виробникові.

## **УПАКОВКА**

Контейнер, що містить 10 г препарату.



PPH CERKAMED Войцех Павловські  
37-450 Стальова Воля, Польща  
вул. Квятковского, 1  
тел/факс 0048 15 842-35-85

|   |  |
|---|--|
| <b>Уповноважений<br/>представник в<br/>Україні та адреса:</b>                                   | Товариство з обмеженою<br>відповідальністю «ІВОДЕНТ»<br><br>вул. Курінного Чорноти, 2,<br>корпус 1, м. Івано-Франківськ,<br>76018, Україна;<br>phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55<br>e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a><br><a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a> |
| <br>UA.TR.101 |  |