

# **INOX**



Гель, що сприяє повній полімеризації композитів

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НИЖЧЕ НАВЕДЕНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

ПРЕПАРАТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТІЛЬКИ ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СКЛАД: пропантриол (гліцерин), очищена вода, гелева основа.

## ПРИЗНАЧЕННЯ

Гель INOX призначений для застосування при:

- Полімеризації пломб зі світлотвердіючих композитів;
- Імплантації протезів з використанням композитних цементів (Наприклад, кріплення вінірів, вкладок inlay, накладок onlay), з метою сприяння повної полімеризації композитів.

Гель INOX захищає поверхню композитів, блокуючи доступ кисню під час їх затвердіння світлом. Таким чином, це не призводить до утворення інгібованого шару киснем на поверхні композиту, завдяки чому процес полімеризації не припиняється і може виконатися правильно. Поверхня композиту, що полімеризується з використанням гелю INOX стає гладкою, більш жорсткою, більш стійкою до подряпин і стирання. Композит стає стійким до зафарбовування, не тече, не липне. Гель пропускає світло фотополімерної лампи, добре змивається водою.

ПРИМІТКА: При роботі з композитним матеріалом необхідно строго дотримуватися керівництва по його застосуванню від виробника. Гель INOX можна використовувати також як гель типу try-in для пробного кріплення протезів.

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Під час полімеризації пломб з світлотвердіючих композитів:

1. Нанести і залишити останній шар композиту, нанести гель INOX, не торкаючись шару пломби аплікатором. Шар гелю повинен щільно покривати всю поверхню композиту і перебувати на ній протягом всього часу полімеризації.
2. Полімеризувати композит світлом через шар гелю.
3. Після закінчення полімеризації гель INOX змити водою.

4. У разі необхідності обробити і відполірувати поверхню композиту.

Під час імплантації протезів з використанням композитних цементів:

1. Після імплантації протезів слід видалити надлишки композитного цементу.
2. На краю пломб винирів, вкладок inlay, накладок onlay нанести гель INOX, не торкаючись шару цементу аплікатором. шар гелю повинен щільно покривати всю поверхню композиту і перебувати на ній протягом всього часу полімеризації.
3. полімеризовувати композит світлом через шар гелю.
4. Після закінчення полімеризації гель INOX змити водою.
5. У разі необхідності обробити і відполірувати поверхню композиту.

Препарат призначений для багаторазового використання, в той час як аплікатор призначений для одноразового використання. Багаторазове використання аплікатора може створювати небезпеку вторинної інфекції.

## ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не застосовувати препарат INOX у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При роботі з продуктом використовувати коферда, рукавички, захисні окуляри і захисний одяг. Препарат може діяти подразнюючи на очі. В разі контакту промити великою кількістю води.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності зазначений на первинній упаковці. Після відкриття упаковки термін придатності не змінюється, при умови щільного закриття після кожного використання.

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКОЮ ВИРОБА


Використані упаковки слід передати для утилізації або повернути виробникові.

УПАКОВКА

Шприц, що містить 2 мл препарату, одноразові аплікатори.



CERKAMED Войцех Павловські  
37-450 Стальова Воля, Польща  
вул. Квятковского, 1  
тел./факс 0048 15 842-35-85

<b>Уповноважений представник в Україні та адреса:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a> <a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a>

Дата останнього оновлення: 07.03.2016/1