

# GLUCOSITE GEL



Рідина для ясенних кишень

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ  
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

Склад: хлоргексидин біглюконат, перекис водню, гелева основа.

## ПРИЗНАЧЕННЯ

GLUCOSITE призначений для використання під час стоматологічних процедур, що виконуються лікарем для того, щоб промити ясенні кишені та для очищення інших важкодоступних областей слизової оболонки порожнини рота.

## СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

За допомогою доданого аплікатора помістити рідину у ясенні кишені, вносити препарат пересуваючи аплікатор уздовж лінії ясен. Після нанесення рекомендується прополоскати рот чистою водою.

При необхідності, процедуру можна повторити приблизно через 7 днів.

Продукт призначений для повторного використання, в той час як аплікатор повинен бути використаний тільки один раз.

Повторне використання аплікатора може становити небезпеку вторинної інфекції.

## ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не слід використовувати у хворих з підвищеною чутливістю до інгредієнтів препарату.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Продукт подразнює очі. У разі контакту, негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

При попаданні всередину, пити багато води, не викликайте блювоту. Зверніться до лікаря.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності при зберіганні знаходиться на первинній упаковці.

Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.

## ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКОЮ ВИРОБА

Порожні упаковки повинні бути утилізовані або повернуті виробникові.

## УПАКОВКА

Шприц, що містить 2 мл продукту, одноразові аплікатори.

Пляшка, що містить 50 мл продукту, адаптер кришку дозатора, одноразові аплікатори.



PPH CERKAMED Войцех Павловскі  
37-450 Стальова Воля, Польща  
вул. Квятковского, 1  
тел./факс 0048 15 842-35-85

<b>Уповноважений представник в Україні та адреса:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a> <a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a>

Дата останнього оновлення: 15.06.2015/2