

**ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЮ
ВИБІР ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ**

ЗАСТОСУВАННЯ

Для стабілізації кофердаму внести корд у простір між зубами, між відкритим та захищеним кофердамом.

Для стабілізації кофердаму достатньо корду довжиною близько 4 см. При необхідності довжина корду може бути адаптована до потреб, відрізавши ножицями.

Використання лубріканта, що розчиняється у воді, полегшує кріплення корду у міжзубному просторі.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°C. Захищати від сонячного світла.

Щільно закрити після використання. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності зазначено на упаковці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Продукт містить латекс, який може викликати алергічні реакції.


ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ

Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробникові.

УПАКОВКА

Дозатор, що містить 1,2 м гумового корду.

Доступні варіанти товщин: тонка, середня і товста.

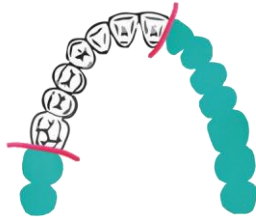

CERKAMED Войцех Павловські
37-450 Стальова Воля, Польща
Вул.. Квятковського, 1
Тел./факс 0048 15 842-35-85

**Уповноважений
представник в
Україні та адреса:**



Товариство з обмеженою
відповідальністю «ІВОДЕНТ»

вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна;
phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua