

RUBBER-DAM liquid

Світлозатвердівуючий кофердам в рідині



ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СКЛАД: уретанові смоли, неорганічні наповнювачі.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Світлотвердівуючий кофердам у рідині призначений:

- для захисту ясен під час стоматологічних процедур: відбілювання, травлення, мікропрепарування, піскоструйна обробка і т. д.
- герметизації гумової хустинки кофердаму.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Для захисту ясен під час стоматологічних процедур:

Очистити і висушити ясна. За допомогою відповідних приладів (наприклад, тримач для щік і губ) - поставити губи і язик, так щоб не допускати до контакту з препаратом. Відкрити шприц і нанести препарат одноразовим аплікатором, що додається. Наносити RUBBER-DAM LIQUID по області застосування, завширшки 4-6 мм і товщиною близько 1,5-2 мм, одночасно контролювати візуально кількість препарату. Якщо це можливо, внести RUBBER-DAM LIQUID у міжзубні проміжки. Затверджувати препарат 15 секунд за допомогою лампи для полімеризації. Процес затвердіння проводити рівномірно, виконуючи плавні рухи. Потім приступити до стоматологічних процедур. Після завершення процедур затверділий RUBBER-DAM LIQUID підважити за допомогою інструмента один з кінців та видалити.

Для ущільнення гумової хустинки кофердаму:

Ізолювати робочий простір (зуб/зуби/лунка) за допомогою гумової хустинки кофердаму RUBBER-DAM.

Для ущільнення гумової хустинки необхідно нанести шар RUBBER-DAM LIQUID на кордоні ясен і самої хустинки. Затверджувати препарат 15 секунд за допомогою лампи для полімеризації. Процес затвердіння проводити рівномірно, виконуючи плавні рухи. Потім приступити до стоматологічних процедур. Після завершення процедур затверділий RUBBER-DAM LIQUID підважити за допомогою інструмента один з кінців та видалити.

Відразу після використання препарату відтягнути поршень шприца назад і закрити упаковку оригінальною кришечкою, щоб уникнути полімеризації препарату в шприці.

Виріб призначений для багаторазового використання, в той час як аплікатор призначений для єдиного використання. Багаторазове використання аплікатора може представляти небезпеку вторинної інфекції.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не слід використовувати препарат у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Незатверділий препарат подразнює шкіру та очі. У разі тривалого контакту зі шкірою може мати подразнюючу дію. У разі контакту негайно промити водою. При проковтуванні може завдати шкоди.

У разі вживання не викликати блювоту. Зв'язатися з лікарем.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°C. Захищати від сонячного світла. Щільно закрити після використання.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності зазначено на упаковці.

Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ


Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробникам.

УПАКОВКА

Шприц, що містить 1,2 мл препарату, одноразові аплікатори.



PPH CERKAMED Войцех Павловські
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковского, 1
тел./факс 0048 15 842-35-85

Уповноважений представник в Україні та адреса:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua

Дата останнього оновлення: 17.02.2014/1