

## Оксид цинку

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ

ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СКЛАД: оксид цинку 100% фармацевтичної чистоти.ПРИЗНАЧЕННЯ

Препарат ZINC OXIDE рекомендується для приготування паст, в основному з евгенолом, як засіб для тимчасових пломб під час пломбування порожнин та корневих каналів.

Оксид-цинк-евгенольний цемент як тимчасове пломбування має протизапальну дію і стимулює утворення вторинного дентину.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

1. Для тимчасового пломбування порожнин суміш повинна бути замішана так, щоб паста не клеїлась до шпателя та скляної чаші.

2. Для тимчасового пломбування корневих каналів, отримана суміш повинна мати густу консистенцію. Суміш залишити у порожнині або кореновому каналі на термін від 1 тижня до 30 днів.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не слід використовувати препарат у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

препарат може подразнювати очі. У разі контакту негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

У разі проковтування випити велику кількість води, не викликати блювоту. Зв'язатися з лікарем. При роботі з препаратом застосовувати кофердам. Використовувати рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25 °С. Оберігати від вологи. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності зазначено на упаковці.

Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ


Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробникам.

УПАКОВКА

Баночка з пластику, що містить 50 г препарату.



PPH CERKAMED Войцех Павловські  
37-450 Стальова Воля, Польща  
вул. Квятковського, 1  
тел/факс 0048 15 842-35-85

<p><b>Уповноважений представник в Україні та адреса:</b></p>	<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»</p>
 <p>UA.TR.101</p>	<p>вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a> <a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a></p>