



МТА+ Аплікатор Преміум

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ


ПРОДУКТ ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

ВИРІБ НЕСТЕРИЛЬНИЙ - СТЕРИЛІЗУВАТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Інструмент стоматологічний багаторазового використання для внесення і аплікації дози замішаного матеріалу МТА+. Інструмент виготовлений з нержавіючої сталі, стійкої до корозії.

Опис виробу

Виріб складається:

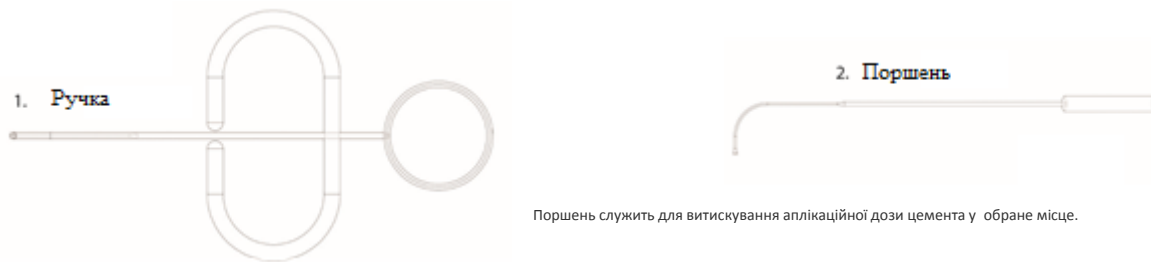

Поршень служить для витискування аплікаційної дози цементу у обране місце.

Поводження з інструментами з нержавіючої сталі

У процесі виготовлення застосовано технології, що мають на меті запевнення стійкості до корозії, однак стійкість знарядь залежить від правильного користування і консервації.

Чищення, обробка та миття

Інструменти поставляються у нестерильному стані. Новий інструмент перед першою стерилізацією, після вилучення з упаковки необхідно ретельно вимити в теплій воді з додаванням миючого засобу. Щоразу перед використанням у іншого пацієнта інструмент повинен стерилізуватися.

Стерилізація


Всі інструменти (багаторазові) повинні бути продезінфіковані, промиті для видалення дезінфекційного засобу і осушені, перш ніж будуть піддані стерилізації. Особливо рекомендується промивати ультразвуковим методом, так як це найбільш ефективний метод. Ці дії слід виконувати після від'єднання окремих частин аплікатора (витягти поршень з ручки). Рекомендовані методи стерилізації:

Метод	Рекомендована температура і час
Автоклав паровий	121 °C, протягом 20 хвили
Сухе повітря	160 °C, від 60 до 120 хвилин
Хімічна пара	132 °C, протягом 20 хвилин

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Для використання виробу необхідно вставити поршень в ручку, потім витягти поршень на 1 см.

Замішаний попередньо до консистенції мокрого піску цемент МТА+ покласти на скло і виконуючи рухи витягнутого цементу в кінчик аплікатора. Вставте кінчик аплікатора безпосередньо в місці перфорації, а потім натисненням поршня внести матеріал.

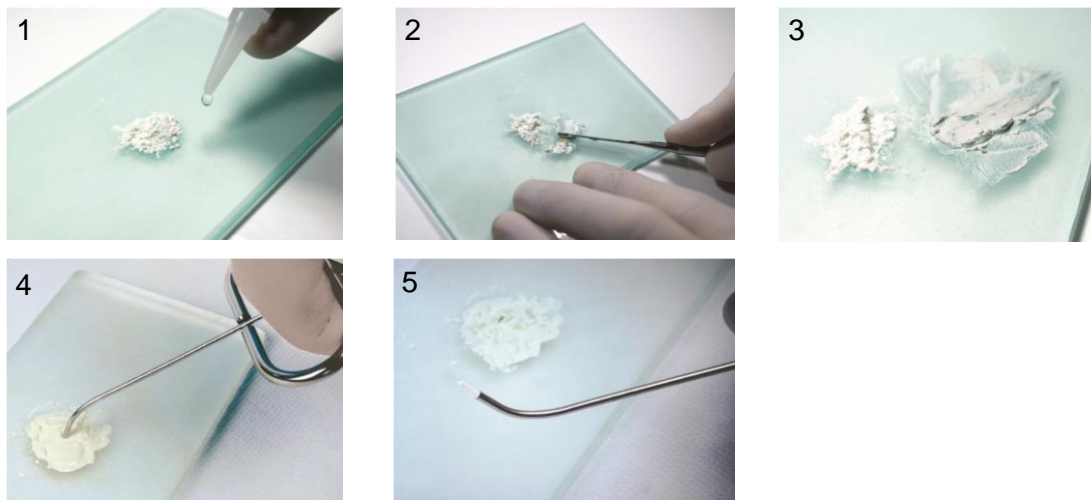

УВАГА!

Відразу після закінчення аплікації, інструмент необхідно очистити від залишків матеріалу і промити водою, щоб уникнути застигання цементу всередині аплікатора.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Зверніться до інформації, що міститься в інструкції з використання препарату МТА+ і порад про очищення та стерилізації інструментів.

ЗБЕРІГАННЯ

Виріб зберігати при температурі 5-30°C і відносній вологості повітря не більше 70%.

Щоразу перед використанням інструменту перевірте на наявність можливих забруднень, пошкоджень структури матеріалу (тріщини, викривлення, розлом, відшарування).

Не дотримання цих правил значно знижує термін служби інструменту і скорочує час його служби.

Серійний номер виробу зазначено на упаковці

Упаковка містить (можливі варіанти):

1. МТА+ Aplikator Premium зігнутий 0,8 мм
2. МТА+ Aplikator Premium зігнутий 1,2 мм
3. МТА+ Aplikator Premium прямий 0,8 мм
4. МТА+ Aplikator Premium прямий 1,2 мм



ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

PPH CERKAMED Войцех Павловські
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковського 1
тел/факс 00 48 15 842 35 85

Уповноважений представник в Україні та адреса:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ» вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua
--	--

Дата останнього оновлення: 12.02.2013/2